



SAFECARE BIO-TECH

SAFECARE COVID-19 Ag

Sada Antigenních Rapid Testů ze Slin

COVID-19 Antigen - Slinný rapid test je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu ve vzorcích slin od osob podezřelých z infekce koronavirem COVID-19 během prvních dnů od nákazy.




COVID-19 Ag Sada Rapid Testů ze slin


Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2
Balení: 25 testů
Skládání: 4-30 °C
Typ vzorku: Sliny
Doba použitelnosti: 24 měsíců
výsledek testu: 10-15 minut

PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY


<Postup testu>

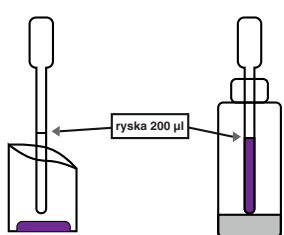


Přenešte 200 µl vzorku slin z jednorázového papírového pohárku do extrakční zkumavky.

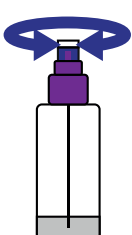

Zašroubujte extrakční zkumavku.

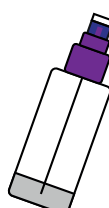


Protřepejte extrakční zkumavku, abyste obsah důkladně promíchali.


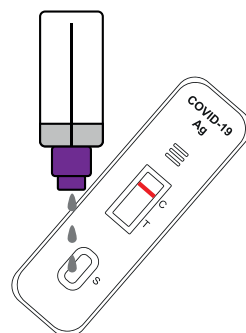


Kápněte 3 kapky vzorku do jamky na kazetě testu.


INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

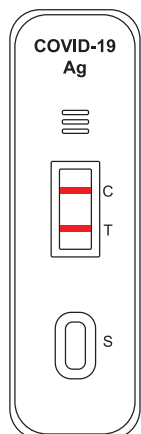


pozitivní

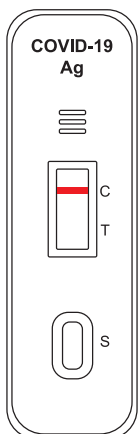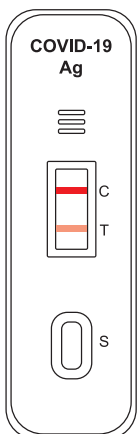

negativní

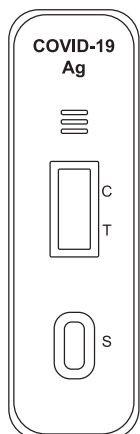

neplatný

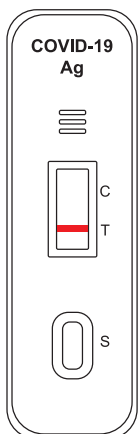

Výrobce: **Safecare Biotech Co., Ltd**

Dovozce do ČR: **IMMOMEDICAL CZ s.r.o.**

Tel.: **+420 239 042 466**

email: **info@immomedical.cz**